



CANARY FACE MASK



ENDOVASCULAR MEDICA CANARIAS

Mascarilla quirúrgica

(BFE \geq 99%) Tipo IIR

LICENCIA DE LA AEMPS: 8623-PS



DESCRIPCIÓN: Mascarilla facial médica – Tipo IIR según normativa UNE - EN 14683:2019 + AC:2019

Las mascarillas faciales quirúrgicas evitan que las partículas de gran tamaño expelidas por el usuario entren en contacto con el paciente o el entorno de trabajo. Las mascarillas de Tipo IIR cuentan con una eficacia de filtración bacteriana de más de 98% y son resistentes a fluidos y salpicadura.


MODELO/REF: EMC-MQ-01

Mascarillas certificadas por Laboratorios AQUIMISA S.A según normativa UNE-EN 14683:2019 + AC:2019 / Mercado CE

Regulación UE 2017/745

CARACTERÍSTICAS:

Tipo IIR: calidad máxima para quirúrgicas. Fabricadas en España. **Desinfectadas con luz ultravioleta.** Está compuesta de tres capas: las capas exteriores en polipropileno no tejido y una capa intermedia filtrante. Tres capas protectoras: Spunbond (o tejido non-woven) de 25 gramos que es la capa exterior de 175 mm, más una capa de Meltblown de 99% de filtración de 25 gramos, más una tercera capa de Spunbond de 25 gramos de 195 mm.

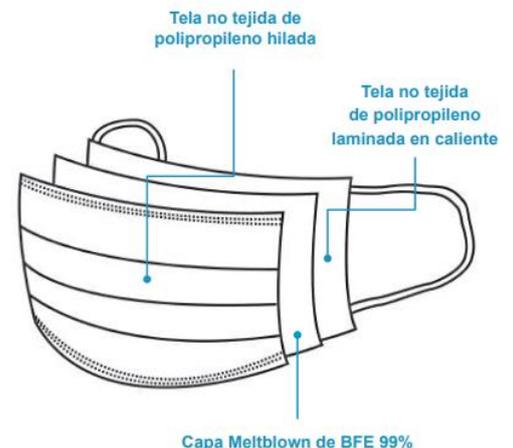

USO RECOMENDADO:

Producto de un solo uso. Las mascarillas quirúrgicas tipo IIR, tienen una eficacia de filtración del 98% y un uso recomendado máximo de 4 horas. No se pueden reutilizar. En caso de que se humedezca o se deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. Utilizada correctamente proporciona un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas.



MODO DE EMPLEO:



Paso 1: Poner la mascarilla en la cara cubriendo nariz y boca, llevando las gomas elásticas o lazos de sujeción tras las orejas. Adaptar la cinta metálica a la nariz.



Paso 2: Comprobar que está bien ajustada. Recolocar los arneses hasta que la mascarilla esté sellada por completo.



Paso 3: Evitar tocar la mascarilla y lavarse las manos con frecuencia.

CONTENIDO: Caja de 50 unidades. Envase unitario.

Disponibilidad en varios colores.

Embalaje: Caja de 40 estuches (2.000 uds).

CADUCIDAD: 5 años desde la fecha de fabricación.



INFORMACIÓN ADICIONAL:

Producto desinfectado con luz ultravioleta.

- BFE ($>99\% \pm 0,05\%$) $\geq 99\%$.
- Presión diferencial (Pa/cm²) < 60 (50) Pa/cm².
- Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) ≥ 16.0 kPa.

Almacenar en lugar seco a temperaturas entre 10°C y 30°C.

Libre de Grafeno, libre de látex y de fibra de vidrio. Hipoalergénico. No estéril.

No tirar al suelo. Desechar en el contenedor.